

HIGHTOP One Step Rapid Test

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest



Hersteller:	HIGHTOP
Artikelname:	One Step Rapid Test
Spezifität:	99,2%
Sensitivität:	97,61% (Ct20-37) 98,38% (Ct20-35) Konfidenzintervall 95%
Dauer:	15 Minuten
Abstrich-Typ:	vordere Nase / nasopharyngeal / oropharyngeal
Verpackung:	25 Tests / Schachtel + 25 Einzeldosen Puffer + 50 Tupfer (25 x dick, 25 x dünn)
Nachweise:	Selbsterklärung
Zertifikat:	CE zertifiziert durch TÜV Süd
Haltbarkeit:	2 Jahre

UID: ATU662900024 | FN355211w | Gerichtsstand: Linz
 Bankverbindung: Sparkasse Oberösterreich
 SWIFT: ASPKAT2LXXX
 IBAN: AT632032000000236605

Tel. +43 7229 23023
 Fax +43 7229 230231
 eMail a.matzner@mikka.com
 Web www.mikka.com

MIKKA Gmbh
 Traunuferstrasse 110
 4052 Ansfelden
 Austria


TESTABLAUF & INTERPRETATION

Probensammlung & Probenextraktion

Verwenden Sie zur Probenentnahme ausschließlich die Tupfer, die der Testkassette beigelegt sind.

Bringen Sie alle Komponenten des Test-Kits 30 Minuten vor Beginn des Testens auf Raumtemperatur (20-max. 30°C).

SELBSTTESTUNG

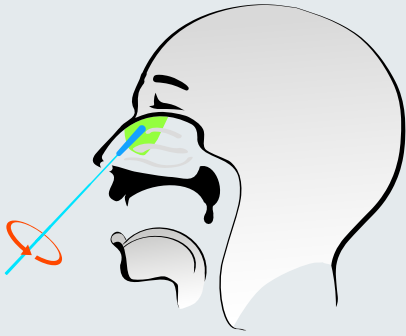


1. PROBE AUS DER VORDEREN NASE

Vordere Nase: Führen Sie den **dicken Tupfer (Anteriornasal Swab)** ca. 2 cm in die vordere Nase ein.

Führen Sie damit 15 Sekunden kreisende Bewegungen an der inneren Nasenwand aus.

Mit dem zweiten Nasenloch wiederholen.


MEDIZINISCHES FACHPERSONAL

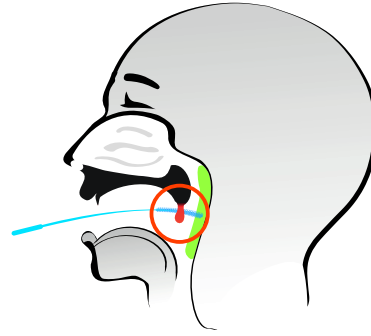

2. PROBE AUS DEM OROPHARYNGX

Führen Sie vorsichtig den **dünnen Tupfer (Nasopharyngeal Swab)** in den Pharynx (Rachen) ein und entnehmen Sie Sekret, indem Sie den Tupfer auf beiden Seiten der Mandeln (Gaumenbögen) und der (geröteten) hinteren Pharynxwand reiben.

Streichen Sie an beiden Seiten der Mandeln mit ein wenig Kraft vor und zurück. Danach reiben Sie an der hinteren Pharynxwand ebenfalls mindestens drei Mal auf und ab.

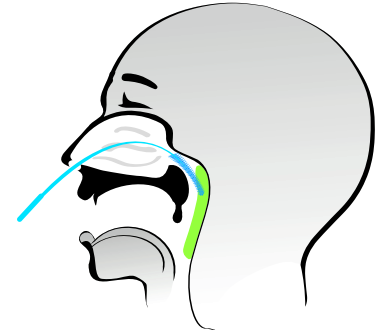

3. PROBE AUS DEM NASENPHARYNGX

Neigen die den Kopf leicht um 45°-70° nach hinten. Führen Sie den **dünnen Tupfer (Nasopharyngeal Swab)** durch das Nasenloch langsam ein, bis Sie Widerstand spüren oder die Länge etwa dem Abstand vom Ohr zum Nasenloch entspricht.

Reiben und drehen Sie den Tupfer sanft und vorsichtig 3-4 Mal. Halten Sie den Tupfer einigen Sekunden ruhig, um Sekrete aufzunehmen. Ziehen Sie den Tupfer vorsichtig mit einer Drehbewegung heraus.

TESTDURCHFÜHRUNG 1

Füllen Sie ~20 Tropfen der Pufferlösung in das Extraktionsröhrchen (bis zur Markierung 0.5).

Nachdem Sie den Abstrich gemacht haben, tauchen sie den Tupfer in die Flüssigkeit.

Drehen und Drücken Sie den Tupfer etwa 10 Mal, um so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Tupfer zu extrahieren.

Ziehen Sie dann den Tupfer aus dem Röhrchen und entsorgen ihn. Schließen Sie das Röhrchen.

TESTDURCHFÜHRUNG 2 & INTERPRETATION DES ERGEBNISSES

